



THUASNE

Description et caractéristiques

MASQUE BARRIÈRE



MASQUE NEZ BOUCHE MENTON AVEC LIENS POUR MAINTIEN



- Masque **anatomique** couvrant le bas du visage.
- Liens s'attachant à **l'arrière de la tête** pour une adaptation optimale à toutes les morphologies de visages.
- **Fenêtre d'identification** assurant que le masque soit à l'usage d'une personne unique.

COULEUR	Blanc
CATÉGORIE ANSM	Catégorie 1
CONFECTION	Tissé
COMPOSITION	92% Polyester, 6% Viscose, 1% Polyamide, 1% Polyuréthane
FILTRATION	Taux de filtration 100% des particules $\geq 3 \mu\text{m}$ Taux de filtration 100% des particules $\geq 1 \mu\text{m}$
RESPIRABILITÉ	102 m/l2/S mesurée par la DGA.
PORT CONTINU	4h00
NB LAVAGES 30 MIN - 60°C	x 30 lavages* Séchage en sèche linge et repassable
BIOCOMPATIBLE	Oui Certifié OEKO TEX et Reach
HYPOALLERGÉNIQUE	Oui
ÉTIQUETTE DE NORME	Spécifications de la norme AFNOR figurant sur le produit
CONDITIONNEMENT	1 lot de 25 conditionnements de 2 masques Notice d'emploi individuelle avec rappel des gestes barrières
PACKAGING	Pour une utilisation en toute sécurité : emballage en lot de 2 masques pour une utilisation quotidienne optimale

* Tests procédure qualité ISO 9001.



Votre masque barrière Thuasne fait partie de l'arsenal des gestes barrières à respecter pour se protéger et protéger les autres.



Se laver très régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter




Porter un masque lors de risque de contact



Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Une bonne mise en place de votre masque est primordiale pour garantir une bonne protection.

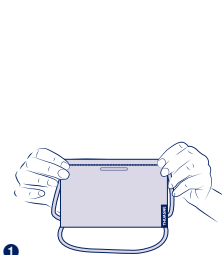

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

A chaque nouvelle mise en place, le masque doit être propre et sec.

- Déplier le masque ①, en présentant le liseré bleu vers le haut. La face EXTÉRIEURE est identifiée par le logo Thuasne.
 - Passer l'attache inférieure autour de la tête ②.
 - Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton. Veiller à l'ajuster au mieux sur le visage.
 - Passer l'attache supérieure autour de la tête ③.
 - Ajuster la barrette nasale sur le haut du masque ④.
 - Vérifier que le masque soit correctement mis en place en vérifiant l'étanchéité. Pour cela, couvrir le masque d'un film plastique ; lors de l'inspiration, le masque doit se plaquer au visage ⑤. Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.
- Le masque peut être porté 4 heures en continu entre chaque lavage.

Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher, ne pas le déplacer.

Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.

Si l'on a besoin de boire ou de manger, changer de masque.

Ce masque est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS) et destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.

Entretien



Votre masque barrière Thuasne est réutilisable et doit être entretenu avec soin :

- Laver le masque à 60°C selon un cycle complet de 30 minutes minimum.
- Laver le masque tous les jours, après chaque utilisation.
- Ne pas laver le masque avec d'autres vêtements ou dispositifs.

Ce masque barrière est personnel ; un cadre destiné à inscrire vos initiales vous permettra de personnaliser votre masque.

THUASNE 
MASQUE BARRIÈRE HAUTE PROTECTION
AFNOR SPEC S76-001 : 2020 CAT.1 FILTRATION >90%
30 LAVAGES - UTILISATION MAX. 4H
UTILISATEUR :

Ce masque est lavable 30 fois*.

Les masques doivent être complètement séchés avant utilisation.

Une grille de suivi des lavages est disponible sur :

www.thuasne.com/masque

Une fois le nombre maximal de lavages atteint, le masque doit être éliminé :

- dans la filière spécifique des déchets associés aux soins à risques infectieux (DASRI)
- dans un sac plastique soigneusement fermé si une élimination via la filière DASRI n'est pas possible.

Composition de la matière principale :

Polyester, Viscose, Polyamide, Polyuréthane. Contient du latex.

* Tests procédure qualité ISO 9001.