

Ce masque est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS) et destiné aux personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.

- Déplier le masque ①, en présentant le liseré bleu vers le haut. La face EXTERIEURE est identifiée par le logo Thuasne.
- Passer l'attache inférieure autour de la tête ②.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton. Veiller à l'ajuster au mieux sur le visage.
- Passer l'attache supérieure autour de la tête ③.
- Ajuster la barrette nasale sur le haut du masque ④.
- Vérifier que le masque soit correctement mis en place en vérifiant l'étanchéité. Pour cela, couvrir le masque d'un film plastique ; lors de l'inspiration, le masque doit se plaquer au visage ⑤. Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte.
- Le masque peut être porté 4 heures en continu entre chaque lavage.
- Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher, ne pas le déplacer.
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.
- Si l'on a besoin de boire ou de manger, changer de masque.

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique. **A chaque nouvelle mise en place, le masque doit être propre et sec.**



Une bonne mise en place de votre masque est primordiale pour garantir une bonne protection.



Votre masque barrière Thuasne fait partie de l'arsenal des gestes barrières à respecter pour se protéger et protéger les autres.

Entretien

Votre masque barrière Thuasne est réutilisable et doit être entretenu avec soin :

- Laver le masque à 60°C selon un cycle complet de 30 minutes minimum.
- Laver le masque tous les jours, après chaque utilisation.
- Ne pas laver le masque avec d'autres vêtements ou dispositifs.
- Séchage au sèche-linge et repassage conseillés.



Ce masque est conçu, développé et fabriqué par **Thuasne, groupe français, spécialiste du dispositif médical, certifié ISO 9001/13485.**

Ce masque est lavable 30 fois*.



Les masques doivent être complètement séchés avant utilisation.
30 lavages*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	Changer de masque

- Une fois le nombre maximal de lavages atteint, le masque doit être éliminé :
- dans la filière spécifique des déchets associés aux soins à risques infectieux (DASRI)
 - dans un sac plastique soigneusement fermé si une élimination via la filière DASRI n'est pas possible.

Composition de la matière principale :

Polyester, Viscose, Polyamide, Polyuréthane

Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

* Tests procédure qualité ISO 9001.

2 MASQUES



UNS 1

Réutilisables 30 fois*

Filtration > 90 %

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Ce masque catégorie 1 « UNS 1 » est un masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 l.m².s⁻¹ pour une dépression de 100 Pa .

- Forme ergonomique
- Douceur au contact de la peau.

- **Utilisation :** le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

* Tests procédure qualité ISO 9001.